
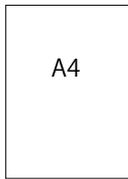



A4×2 transparent sheet

Transparent A4 clear file folder

scissors or box cutter

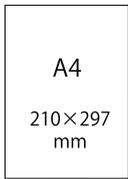


or






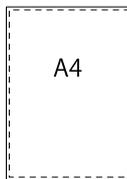


+

cord or Hair elastic

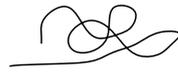

tape

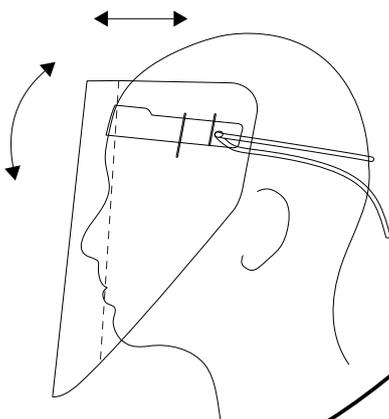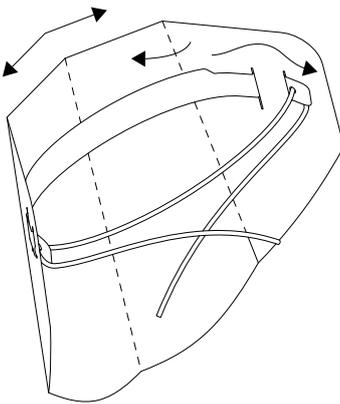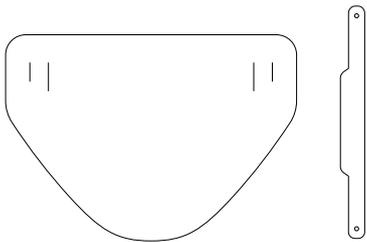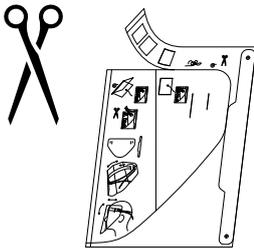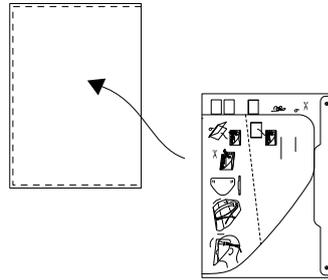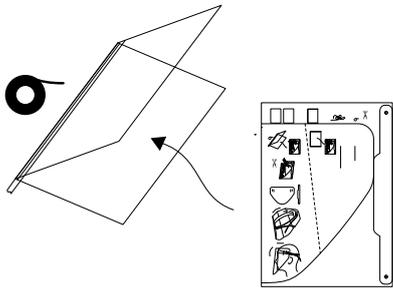

A4 210×297mm

[re:koto]


ORIGAMI face shield

- ・本シールドは許諾なくご使用頂けます。
- ・本シールドを作製し使用する場合、自己責任のもとでおこなってください。
- ・本シールドは医療用の検証をおこなった物ではございません。
- ・営利目的のご使用はお控えください。
- ・デザインや仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ・This shield can be used without permission.
- ・When making and using this shield, please do so at your own risk.
- ・This shield has not been verified for medical use.
- ・Please refrain from using this shield for commercial purposes.
- ・Please note that designs and specifications are subject to change without notice.



ORIGAMI face shield

補足説明 supplement

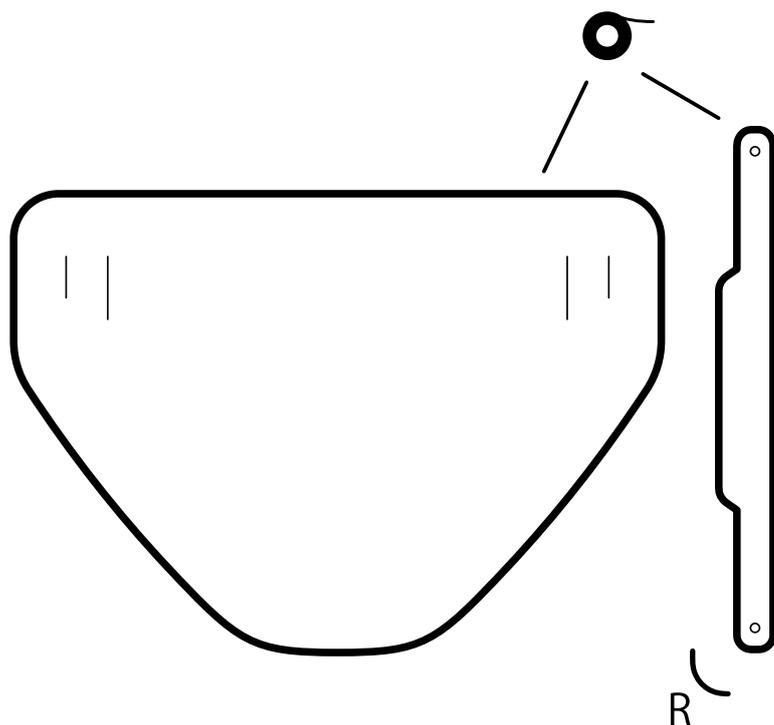


・透明シートの厚さやカット方法によっては、皮膚を切る場合が考えられます。外周をテープで保護すると安全です。
・凸部にはラウンドを入れてカットします。

・Depending on the thickness of the transparent sheet and how it is cut, there may be cases where the skin is cut. Protecting the outer circumference with tape will keep you safe.
・Cut a round in the convex part.

※印刷時のプリンターの設定は縮小せずに、A4サイズ100%で出力してください。


※Please do not resize the print size and print at 100% of A4(210×297mm) size when printing.

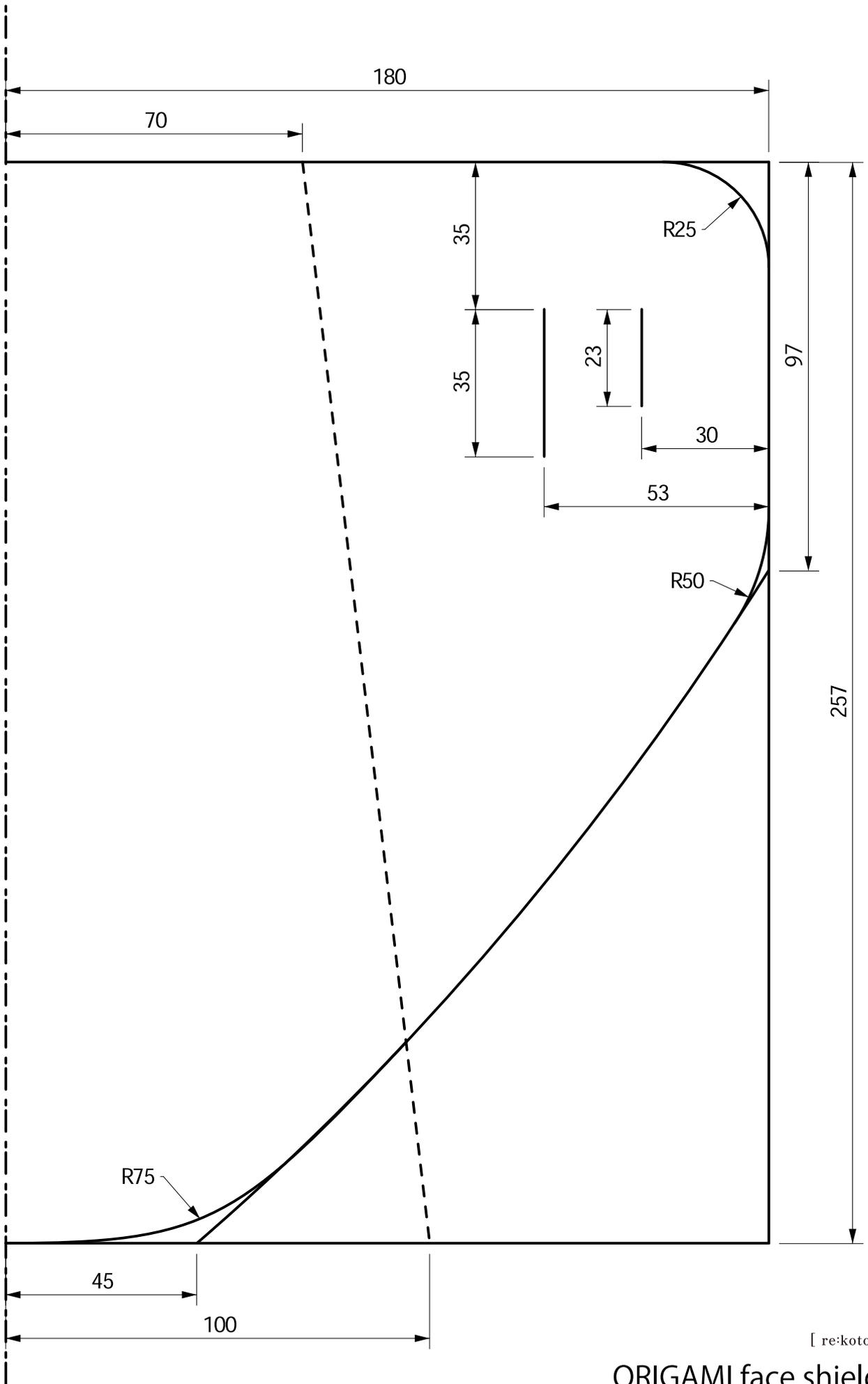

[re:koto]

ORIGAMI face shield

unit:mm

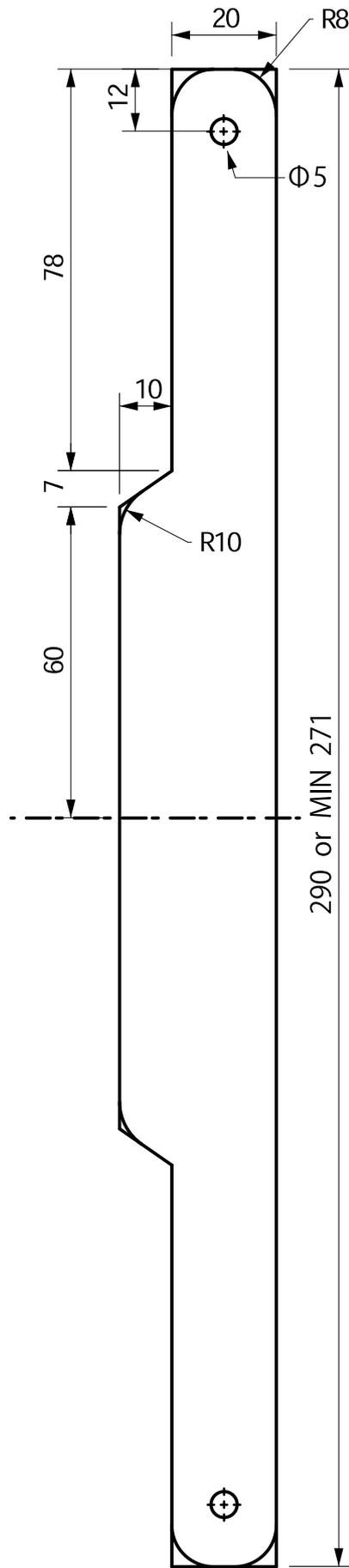

[re:koto]

ORIGAMI face shield
unit:mm